



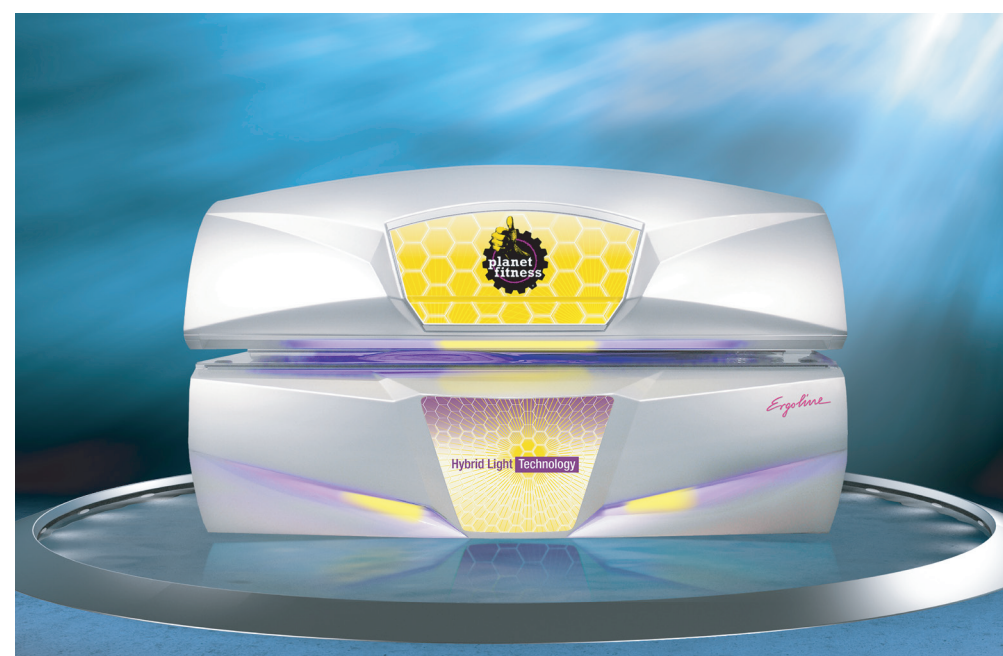

ERGOLINE PLANET FITNESS 42/4 HLT

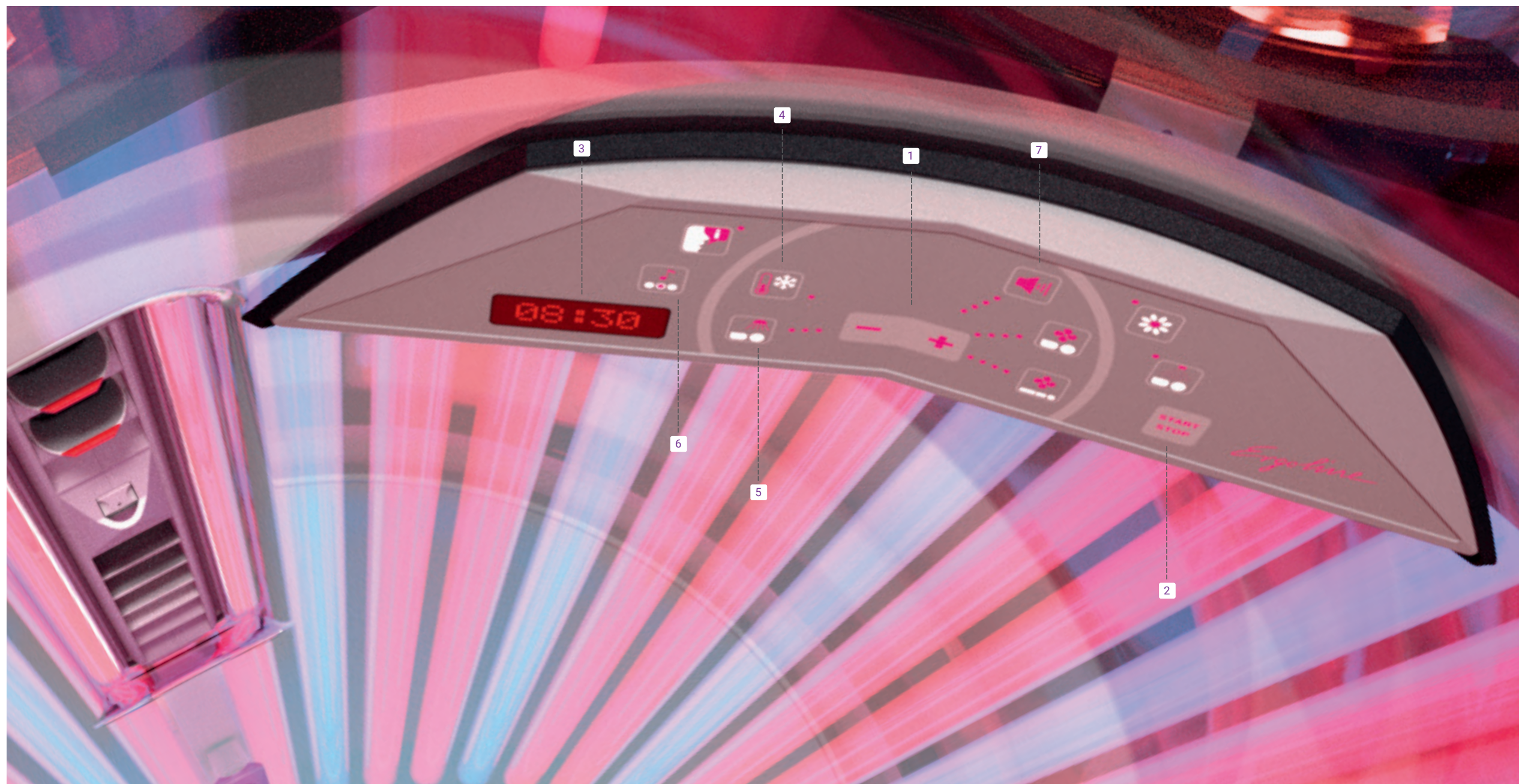

PLANET FITNESS 42/4 HLT

TIEMPO MÁXIMO DE SESIÓN: 12 MIN

OPERACIÓN

- Para elegir las funciones individuales, presione esa función en el panel de control
- Para configurar cada función individual, use los botones más y menos

1 PANEL DE CONTROL

Seleccione el ícono que desea cambiar, luego use los botones de ícono para navegar a la función de la cama solar PF 42/4 HLT que desea ajustar. Una vez seleccionada, el indicador de la función comenzará a parpadear. Para ajustar la función seleccionada, presione los botones más o menos para aumentar o disminuir la configuración. Continúe tocando (no mantenga) los botones más o menos hasta alcanzar la intensidad deseada.

2 INICIAR/DETENER

El personal de Planet Fitness enciende las lámparas de la cama PF 42/4 HLT. Si la unidad está conectada a un sistema de control, las luces se encienden automáticamente al final del período de retraso programado. También puede encender las lámparas inmediatamente presionando el botón Iniciar/Detener en el panel de control. Puede mantener presionado el botón Iniciar/Detener para apagar las lámparas en cualquier momento durante su sesión. Presione el botón nuevamente para reiniciar las lámparas. Sin embargo, tenga en cuenta que, según el salón, las interrupciones pueden contar como parte de su tiempo de sesión programado continuo.

3 PANTALLA LED

Cuando se inicia una sesión, la pantalla indica el tiempo transcurrido. También muestra la configuración actual de la función seleccionada.

4 REFRIGERACIÓN CONFORTABLE PLUS

Para apagarlo, navegue por el símbolo de enfriamiento y luego presione el botón menos. Para volver a encenderlo, navegue hasta el símbolo de enfriamiento y luego presione el botón más

5 BRONCEADORES FACIALES

Las lámparas de bronceado facial del PF 42/4 HLT se pueden apagar o encender manualmente. La cama de bronceado siempre comenzará con los bronceadores faciales encendidos. Para apagarlos, navegue por el símbolo del bronceador facial en el panel de control y luego presione el botón menos. Para volver a activarlos, navegue hasta el símbolo del bronceador facial y luego presione el botón más. Tenga en cuenta que los bronceadores faciales requieren un breve período de enfriamiento antes de volver a funcionar (indicado por una luz LED parpadear).

6 MP3 Y SONIDO ESTÉREO

Puede cambiar la fuente de música, tarjeta SD o sistema de música de salón (si está disponible) o su propio reproductor de MP3 presionando este botón y luego usando los botones más y menos.

7 VOLUMEN

Si la cama PF 42/4 HLT está equipada y conectada a un sistema de música central, puede cambiar el volumen de la música presionando este botón. Luego use los botones más y menos para aumentar o disminuir el volumen. Si el PF 42/4 HLT está equipado con MP3, puede usar su propio reproductor de música MP3, se detecta automáticamente.

CONSEJOS PARA EL MEJOR BRONCEADO

CAMAS DE BRONCEADO ERGOLINE

En las camas de bronceado Ergoline puede relajarse y disfrutar del sol, incluso si afuera está lloviendo o nevando. Sin embargo, se aplica la misma regla que con el bronceado al aire libre: ¡no se apresure! En otras palabras, nunca tome el sol más de una vez al día.

TIPO DE PIEL INDIVIDUAL

Dependiendo del tipo de piel, las personas reaccionan de manera diferente a la luz solar. Cuando se broncea con luz solar natural y en camas de bronceado, es importante conocer su propio tipo de piel en particular.

- Tipo de piel I: piel blanca pálida, ojos azules o verdes, pelo rojo, muchas pecas, siempre se quema y nunca se broncea.
- Tipo de piel II: piel beige, ojos azules o grises, cabello rubio o castaño claro, algunas pecas, fuerte tendencia a las quemaduras solares, pero a veces se broncea.
- Tipo de piel III: piel morena clara, ojos y cabello castaños, a veces se quema pero siempre se broncea. Tipo de piel IV: piel marrón claro u oliva, ojos y cabello marrón oscuro, a veces se quema y se broncea con facilidad.
- Tipo de piel V: piel morena, cabello y ojos castaños oscuros, rara vez se quema y se broncea con facilidad.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN INICIAL

El tiempo de exposición inicial, con el que debe comenzar, depende de su tipo de piel, el dispositivo de bronceado y el tipo de lámparas utilizadas. Siga siempre el programa de exposición recomendado para su tipo de piel y nunca exceda el programa de exposición máximo del dispositivo de bronceado. Esto debe aparecer en la parte frontal de la unidad de bronceado, o consulte con el personal de Planet Fitness, quien le aconsejará sobre los procedimientos adecuados. El tipo de piel no pigmentada I debe evitar el proceso de bronceado.

PROTECCIÓN DE LA PIEL

Tu piel necesita cuidados antes y después del bronceado. Se recomiendan los productos para el cuidado de la piel que están específicamente formulados para funcionar de forma sinérgica con el proceso de bronceado porque contienen una combinación especial de ingredientes que mejoran el proceso de bronceado y nutren la piel. Para obtener más detalles, consulte con su personal de Planet Fitness.

GAFAS PROTECTORAS

Mantenga los ojos cerrados mientras se broncea y use siempre gafas protectoras que bloqueen la luz ultravioleta. Los lentes de contacto deben quitarse antes del bronceado.

PRODUCTOS COSMÉTICOS

Antes de broncearse, quítese con cuidado todos los cosméticos de su piel y quítese todas las joyas. No use lociones de protección solar durante el bronceado, ya que pueden restar valor al efecto bronceador.

MEDICAMENTO

Si está tomando medicamentos o sufre algún trastorno de la piel, tenga en cuenta que ciertos medicamentos pueden ser fotosensibles. Estos medicamentos pueden causar una reacción adversa cuando el cuerpo se expone a la luz ultravioleta. En este lugar se debe exhibir una lista que identifique muchos medicamentos, alimentos e ingredientes fotosensibles. Siempre consulte a su médico si tiene alguna pregunta o inquietud.

HIGIENE DEL EQUIPO

La higiene adecuada del equipo es de suma importancia para su salud. La zona de acrílico debe limpiarse con un desinfectante especial antes de cada sesión

LLAME GRATIS: 888.771.0996 | www.jkproducts.us

Aviso: lea la etiqueta de advertencia obligatoria de la FDA en cada máquina de bronceado para obtener información importante sobre posibles lesiones oculares, cáncer de piel, envejecimiento de la piel y reacción fotosensible y uso adecuado. Se deben usar anteojos protectores que cumplan con los requisitos cuando se usa cualquier dispositivo o sistema de bronceado en interiores.

CONTRAINDICACIONES: Siga las instrucciones. Evite la sobreexposición como con la luz solar natural. La sobreexposición puede causar lesiones en los ojos o la piel y reacciones alérgicas. La exposición repetida puede causar envejecimiento prematuro de la piel y cáncer de piel. ¡UTILICE SIEMPRE GAFAS DE PROTECCIÓN! Si no lo hace, puede sufrir quemaduras graves o lesiones oculares a largo plazo. Ciertos medicamentos o cosméticos pueden aumentar su sensibilidad a la radiación ultravioleta. Consulte a un médico antes de usar lámparas solares si está usando medicamentos, tiene antecedentes de problemas en la piel o cree que es especialmente sensible a la luz solar. Si no se broncea con el sol, es poco probable que se broncee con el uso de este producto. Consulte el programa de exposición recomendado para su tipo de piel y no se broncee más de una vez en un período de 24 horas. Atención: este producto de lámpara solar no debe usarse en personas menores de 18 años. Las personas que no deben usar este dispositivo incluyen a cualquiera que esté quemada por el sol, que tenga heridas abiertas, que sea naturalmente pálida, que tenga parches descoloridos en la piel, que tenga un mayor riesgo de cáncer de piel, que esté en tratamiento o que esté tomando medicamentos que causen fotosensibilidad, que esté embarazada, que tenga lunares o más de 16 lunares en su cuerpo (2 mm de diámetro o más).

© 2020 JK Products & Services, Inc.

Ergoline